

微量注射泵

	姓名						
	学号						
	成绩						
操作要求	标准得分	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数
着装仪表：衣服、鞋、袜整洁、未化浓妆、无饰物	3						
用物准备：齐全，规范检查，携至床旁	5						
核对床号和姓名，向患者解释说明	5						
核对输液卡，三查八对，根据医嘱抽吸药液，	5						
贴标签，注明床号、姓名、用药时间、速度、药物名称和浓度	5						
检查并连接延长管（包装是否完好，生产日期和有效期）排尽空气	10						
通过注射泵的固定夹将其固定于输液支架上	10						
连接电源	2						
固定注射器：将注射器安全支架的压杆拉起，拨向最上部后向左旋转 90°，将已抽好药液的注射器放入安装槽内，注意注射器尾端的圈边卡入微量泵的驱动杆后座，旋转压杆使之压住卡紧注射器。	10						
能正确设置输液速度和总量，能够清零：在“STOP”状态下，按“SET”选择键，“RATE”速率灯亮，按数据输入键调节速度（ml/h）；再按“SET”选择键，∑ml 灯亮，必要时选择输注总量限制，按“CLAER”清零键 1.5 秒可将总量清零。	10						
启动推注 再次核对床号和姓名，确定药物和设定速度无误后，可使用快速输注键，进行再次排气，确认注射器及连接管内不含气泡，打开并消毒静脉输液通路的三通开关连接，打开三通阀开始推注。	10						
根据病情需要快速推注某种药物	5						
可在使用过程中改变给药速度	5						
整理用物及床单位	3						
观察和记录	2						
更换注射器方法正确	5						
关机过程正确：先按“STOP”键，分离延长管、三通和静脉通路，脉冲式封管，关上三通开关，取下注射器及延长管，推进器和安全支架回归原位，按电源键“ON/OFF”3 秒后，切断电源，关机。	5						