

人工呼吸机的使用

	姓名						
	学号						
	成绩						
操作要求	标准得分	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数
护士接到医嘱后，至治疗室，洗手，戴口罩，准备用物	5						
检查各类无菌物品有效期，包装有无潮湿、破损	5						
准备湿化液：消毒灭菌注射用水；关闭输液器水止，打开输液器外包装，将其与灭菌注射用水连接	5						
在液体瓶签上注明用途、开启时间，将瓶签贴于液体袋上	5						
准备呼吸机管路	5						
护士推治疗车到床旁，连接呼吸机电源、气源，	3						
将灭菌注射用水挂于输液架上，排气	2						
用 75%酒精擦拭呼吸机送气口内侧、外侧、接口处，呼吸机出气口内侧、外侧、接口处	5						
打开呼吸机管路包装袋，戴无菌手套	8						
将湿化罐安装在湿化器上；短硅胶管一端与呼吸机送气口连接，另一端与湿化罐侧口连接	8						
将长硅胶管，带传感器一端与湿化罐正中接口连接，另一端固定在支架上	8						
将集水杯与 2 条中硅胶管连接后，将中硅胶管一端与呼吸机出气口连接，另一端固定在支架上	8						
取出三通接头，将带有传感器接口的一端与长硅胶管连接，另一端与中硅胶管连接	8						
将传感器与湿化器探测头及管路入气口连接，妥善固定	5						
将呼吸回路与三通接头连接	5						
脱去手套，取出模拟肺，将模拟肺与呼吸回路连接	5						
强灭菌注射用水加至湿化罐水位线，关闭水止	3						
分别打开呼吸机湿化罐、主机开关，进行机器自检，呼吸机实际参数与设定参数误差不能超过 10%	2						
使机器处于待机状态	2						
将呼吸机置于适宜位置，便于护士操作，调整呼吸机管路位置，以不影响患者变换体位为宜。呼吸机准备完毕	3						