

除颤器的使用

	班级						
	姓名						
	学号						
	成绩						
操作要求	标准得分	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数
着装仪表：衣服、鞋、袜整洁、未化浓妆、无饰物	2						
用物准备：齐全，规范检查	5						
向患者解释说明	3						
除颤器平放或竖放	5						
打开电源开关，启动仪器，电瓶状态标志旁的绿色指示灯闪亮	5						
仪器开启后，键盘上的第3区显示20焦耳能量等级的显示器将会闪烁，再按相应的按键来选择所需的能量等级。	10						
分别从仪器左右两边的支架上取出电极	5						
电极接触面上涂上3mm厚的凝胶	10						
按下充电键进行充电操作	5						
涂完凝胶的电极沿着心脏轴线放置，并压实，使它与皮肤表面充分接触	10						
在进行心脏除颤治疗之前，必须确保：							
床旁都没有与患者接触者	5						
在患者与其他设备之间的所有导体都已经移开	5						
没有任何导电物质在心脏除颤治疗的范围内	5						
选择了适合患者状况的能量等级	5						
两个电极与患者保持良好的、全面的接触	5						
开启仪器除颤前再次观察心电监护，确定需要除颤	5						
用双手大拇指同时按下启动键，开启仪器进行心脏除颤治疗	5						
检查本次心脏除颤治疗是否有效	5						