

输液泵

	姓名						
	学号						
	成绩						
操作要求	标准得分	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数	扣除分数
着装仪表：衣服、鞋、袜整洁、未化浓妆、无饰物	5						
用物准备：齐全，规范检查，携至床旁	5						
核对床号和姓名，向患者解释说明	5						
连接输液管并排气 认真查对医嘱、输液卡及药物，检查药物的质量。按常规静脉输液备好液体。	5						
根据医嘱配制输注液体，检查特制的输液泵管（包装是否完好，生产日期和有效期，输液泵管与输液泵是否匹配）并连接到所需液体上，确保排尽输液管内空气，墨菲滴管内充满约 1/3 液体。	10						
固定输液泵，接通电源 将输液泵妥善放置固定在床旁安稳的位置，连接电源。打开电源开关，按“ON/OFF”键，开机自检。	10						
置于泵槽内 抬起输液泵门夹，打开泵门及泵内止水夹，将管路垂直放于管槽内（检查管路在气泡检测器及压力传感器部位安装是否合适），注意不要压迫管道。关闭泵门，压下门夹，如需要可将红外线感光器（滴液传感器）夹于莫菲滴管上，打开输液器调节阀。	15						
设置 待机器自检完毕确认输液泵无报警后，设置输液速度和输液总量。按“SET”键，屏幕显示“RATE”（流速）时，根据病情和药物等设定输液速度（ml/h），范围 1~1000ml/h；重新按“SET”键，屏幕显示“VOL.LIMIT”时，设定输入液体总量（ml）。	15						
启动输液 再次核对床号和姓名，确定药物及设定速度无误后，按“START”键，机器运转正常时可见绿灯闪烁，将点滴正常的输液泵管与患者静脉通路连接，输液开始，观察机器运行状态。	10						
整理用物及床单位，观察记录	5						
关机 “COMPLETE”完成指示灯闪烁（提示输液达到设定限量），按键关机，先按“STOP”停止键，再按“ON/OFF”开关键。关闭输液器调节阀。将输液泵管与患者分离，脉冲式封管，打开泵门取出输液器，关闭阀门，压下门夹，切断电源。	10						
整理用物，洗手，记录输液停止时间及输入总量并签名。清洁输液泵，充电、指定地点放置和备用。	5						